

Radiofréquence RF Medical



Traitement du ronflement et de l'apnée du sommeil

Avec contrôle de température



- ✓ **Contrôle de température**
- ✓ Identification automatique de l'électrode
- ✓ Stockage des données sur USB
- ✓ Ecran tactile
- ✓ Algorithmes dédiés pré-réglés

Quels sont les avantages ?

C'est une technique **MINI-INVASIVE**, permettant :

- Insertion par **VOIE NASALE OU BUCCALE**
- Traitement en **AMBULATOIRE**
- Sous **ANESTHESIE LOCALE**



Nos références

Références	Longueur	Largeur	Diamètre
ENTS 1103	11 cm	0.3 cm	Ø1.06 mm
ENTS 1105	11 cm	0.5 cm	Ø1.06 mm
ENTS 1107	11 cm	0.7 cm	Ø1.06 mm
ENTS 1110	11 cm	1.0 cm	Ø1.06 mm
ENTS1203	12 cm	0.3 cm	Ø1.26 mm
ENTS 1205	12 cm	0.5 cm	Ø1.26 mm
ENTS 1207	12 cm	0.7 cm	Ø1.26 mm
ENTS 1210	12 cm	1.0 cm	Ø1.26 mm

Le mode d'action

1. INTRODUCTION DE L'ELECTRODE


Bien visualiser les zones à traiter avant d'y **insérer** l'électrode. Introduisez la ensuite jusqu'à ces zones en passant par la voie nasale ou buccale en fonction du traitement.

3. TRAITEMENT PAR RADIOFREQUENCE


Une fois l'électrode bien positionnée, activez le traitement. Un premier **cycle** automatisé débutera. Seulement quelques secondes suffisent par lésion. Après quelques minutes, la pompe et la RF s'arrêteront **automatiquement**.

2. PREPARATION DE L'ABLATION

Faire une anesthésie locale selon l'appréciation du praticien. Connectez l'électrode au générateur, sélectionnez l'indication **ORL** dans le logiciel. Puis sélectionnez **« Memory 3 »** comme choix de traitement standard.

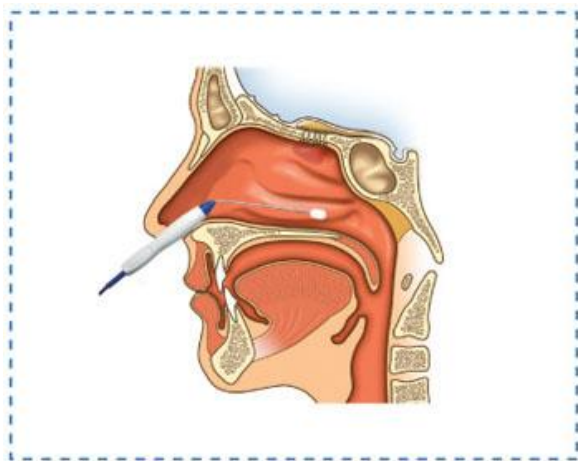

Traitement du cornet nasal

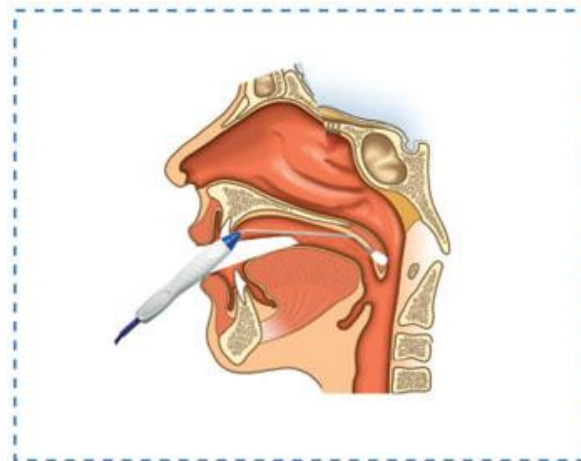

Traitement du voile du palais



DISTRIBUTION **EXCLUSIVE** EN FRANCE

3 ALLEE DU CLOS TONNERRE - 91120 PALAISEAU

CONTACT : ivc@vomedica.com

TEL: 01.70.27.31.62 - RCS EVRY 792 480 857

www.vomedica.com

IMPORTANT : Veuillez-vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, des contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.